

Käyttöohje: Revamil

Tuote

Revamil hydrofiilinen haavageeli
18 g hunajageeliä haavanhoitoon

Tuotekuvaus

Revamil-haavageeli on valmistettu puhtaasta hunajasta, jota tuotetaan valvotuissa olosuhteissa. Valvottu tuotantoprosessi takaa, ettei Revamil sisällä jämiä torjunta-aineista ja että Revamilin laatu pysyy tuotannossa tasaisena.

Revamil-hunaja sisältää runsaasti hunajaentsyymejä, mm. glukoosioksideasia. Revamilia tulee käyttää yhdessä puoliokklusiivisen peittosidoksen kanssa, jotta haavaympäristö pysyy kosteana. Peittosidos kiinnitetään normaaliin tapaan. Korkean sokeripitoisuuden ansiosta osa haavanesteestä sekoittuu Revamilin kanssa ja muodostaa kerroksen, joka vahvistaa haavasidoksen antibakteerista suojaa.

Käyttö

1. Puhdista haava ennen Revamil-haavageelin levittämistä.
2. Levitä ohut kerros Revamil-haavageeliä toissijaiselle haavasidokselle, jolla haava peitetään.
3. Revamil-haavageeli voidaan myös levittää suoraan haavaan ja peittää sen jälkeen semiokklusiivisella haavasidoksella.
4. Kiinnitä peittosidos tavanomaiseen tapaan.
5. Toista käsittely joka päivä tai joka toinen päivä haavan tyypistä riippuen.

Käyttöaiheet

Revamil-haavageeliä voidaan käyttää kroonisiin haavoihin (makuuhaavat, erilaiset haavaumat), tulehtuneisiin haavoihin, akuutteihin haavoihin, kirurgisiin ja sädehoidosta johtuviin syöpähaavoihin sekä pieniin (1. ja 2. asteen) palovammoihin.

Vasta-aiheet

- Ei saa käyttää potilailla, joiden tiedetään olevan yliherkkiä hunajalle.

Haittavaikutukset

- Revamil-haavageeli voi joissakin tapauksissa aiheuttaa lyhytaikaista kirvelyä.
- Jos Revamilin käytön jälkeen havaitaan odottamattomia (tässä mainitsemattomia) sivuvaikutuksia, ota yhteys lääkäriin tai tuotteen valmistajaan.

Käyttöön liittyvät varotoimet

- Ei saa käyttää, jos voidesputki on vahingoittunut.
- Kostuta haava 0,9-prosenttisella suolaliuoksella (NaCl) ennen haavageelin levittämistä.
- Voidesputki on suljettava käytön jälkeen.
- Vältä voidesputken suoraa kosketusta haavan pintaan.
- Avattu voidesputki on käytettävä 3 kuukauden kuluessa.
- Älä käytä samaa voidesputkea useille potilaille.
- Samaa haavaa voi käsitellä tällä tuotteella keskeytyksettä korkeintaan 30 päivän ajan.

Säilytys

Säilytyslämpötila 10–30 °C

Valmistaja

Markkinoija